

Innerspace

THE SIMULATOR COMPANY

Innerspace Simulator

USAGE MANUAL

Meta Quest 3

Japanese



この文書の手順は、トレーナーが関与するように設計されています。
ただし、これらの手順はtraineeが単独で実行することも可能です。

USAGE MANUAL

1



トレーニング前

2




トレーニング中

3




トレーニング後


Innerspace Simulator トレーニング前

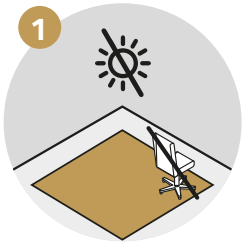

1 トレーニングエリアに障害物がなく、直射日光が当たらず、反射面がないことを確認してください。

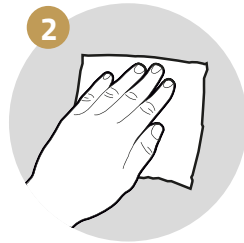


2 機器を清掃し、消毒してください。

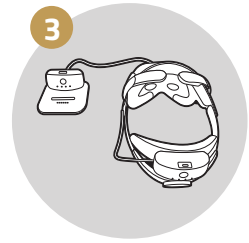


3 充電ドックからフル充電されたバッテリーを取り出し、ヘッドセットの背面のスロットに装着してください。



4 ラップトップでALVRアプリケーションを起動すると、SteamVRアプリケーションが自動的に開きます。

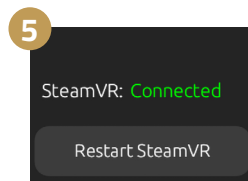

5 ALVRダッシュボードが表示され、左下にSteamVRが接続されていることが示されています。

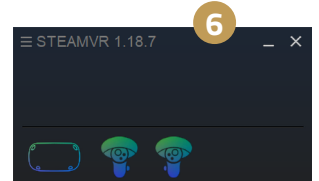

6 SteamVRでは、ヘッドセットとコントローラーのアイコンが表示されますが、使用されていないため、ハードウェアはスタンバイモードになっている可能性があります。



7 ノートパソコンでInnerspace Simulator Hubアプリケーションを起動してください。



ご質問はございますか？

当社のトラブルシューティングガイドは、問題解決のお役に立ちます。

サポートポータル support.innerspace.eu にアクセスしてください。または、次のヘルプデスクまでお問い合わせください


support@innerspace.eu

Innerspace Simulator トレーニング中

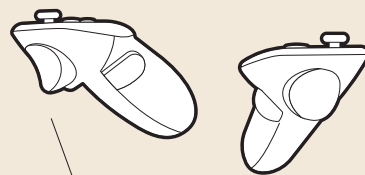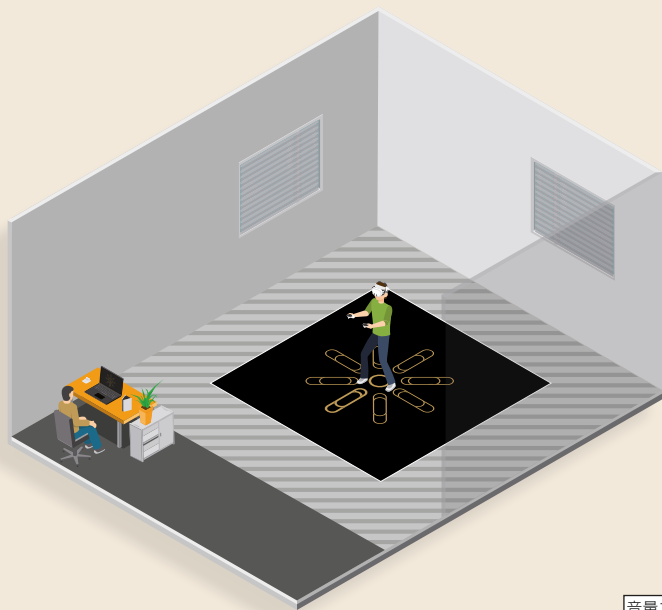

人差し指ボタン

コントローラーは、シミュレーター環境でのtraineeの仮想の手です。

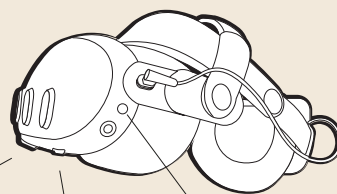

音量コントロール

目の距離調整

オン/オフボタン


Traineeのヘッドセットは、仮想現実 (VR) への入り口です。




1
traineeを歓迎してください。



2
trainee が健康と安全に関するガイドラインに精通し、モジュールの学習目標を理解していることを確認してください。

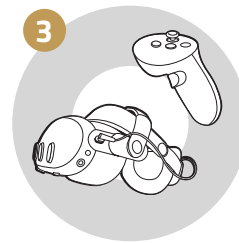

3
traineeにシミュレーターシステムとVR機器を紹介してください。

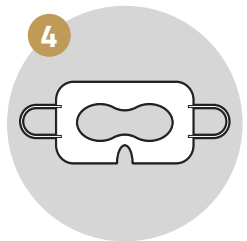


4
traineeに新しいVR衛生フェイスマスクを着用してもらい、目を覆わずに顔全体を覆い、ゴムバンドを耳にかけるようにします。




オン/オフボタン

5
traineeがヘッドセットをつけるのを手伝ってください。ヘッドセットがオフの場合は、ボタンを2秒間押しオンにします。trainee にヘッドセットを調整させて、より鮮明な画像を得られるようにしてください。

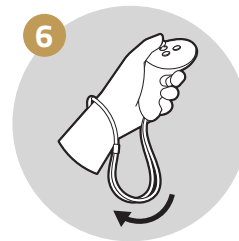


6
trainee にコントローラーを渡してください。ストラップは手首に巻き付けて、しっかりと締めてください。

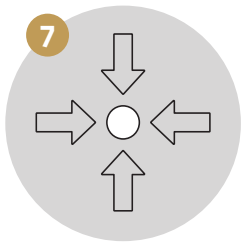

traineeを部屋のプレイエリアの中心に案内してください。VR体験を最大限に楽しむには、彼らがストリーミングルーターが置かれた機器テーブルの方を向いていることを確認してください。



今、traineeにコントローラーの背面にある人差し指ボタンを使ってPIN 0000を入力し、続行を押すように指示してください。

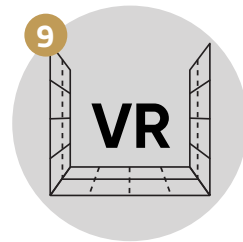

数秒後、彼らは山の風景の中いることに気付くでしょう。traineeがVRの境界をテストしながら移動できるよう、誘導し、支援してください。



トレーニーにモジュールを通してプレイさせてください

ノートパソコンでトレーニングモジュールを開始し、traineeを監督してください。シミュレーションとtraineeの安全性とパフォーマンスを監視し、必要に応じて支援を提供してください。



トレーニングモジュールが完了したら、トレーニーの手首からコントローラーを外し、ドッキングステーションに戻してください。ヘッドセットを外す手助けをし、traineeを現実の世界に戻してください。



トレーニングのパフォーマンスについて話し合い、個々のニーズに対応してください。



traineeの皮膚に直接触れたVR機器の表面を消毒してください。




トレーニングモジュールを終了してください。

Innerspace Simulator トレーニング後



ヘッドセットの後部からバッテリーを取り外し、充電ドックに戻し、次回のトレーニングセッションに十分な充電を確認してください。

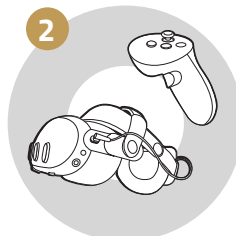

直射日光や湿気は損傷の原因となる可能性があることを念頭に置き、VRヘッドセット機器を安全に保管し、施錠してください。



ノートパソコンのすべてのアプリケーションを閉じますが、ノートパソコンの電源は入れたままにしてください。



これらの手順がすべて完了したら、作業スペースを適切に清掃してください。

ご質問はございますか？

当社のトラブルシューティングガイドは、問題解決のお役に立ちます。

サポートポータル support.innerspace.eu にアクセスしてください。

または、次のヘルプデスクまでお問い合わせください support@innerspace.eu



