

**Innerspace**


THE SIMULATOR COMPANY

**Innerspace Simulator**

# USAGE MANUAL

Meta Quest 3

*Korean*

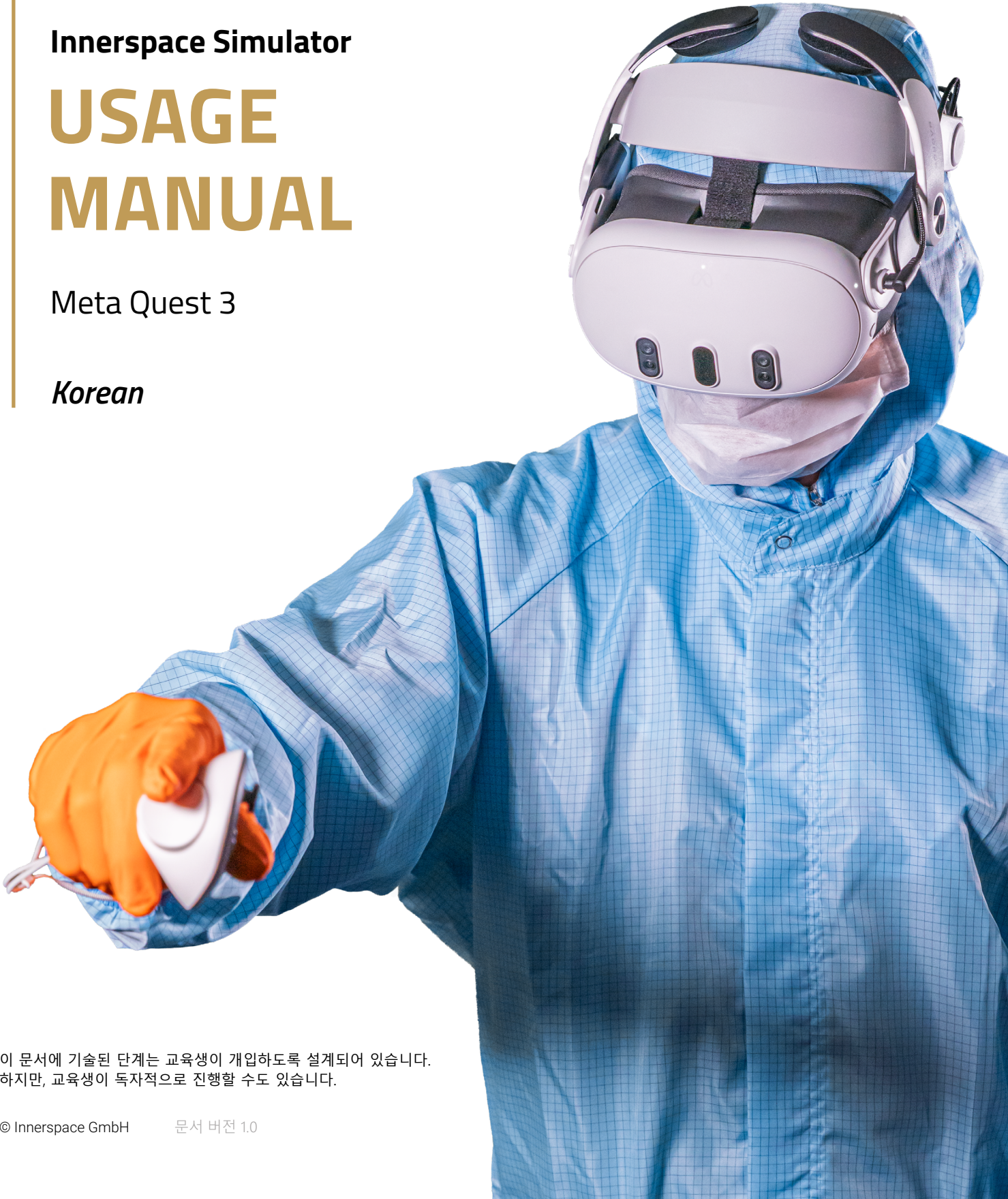

이 문서에 기술된 단계는 교육생이 개입하도록 설계되어 있습니다.  
하지만, 교육생이 독자적으로 진행할 수도 있습니다.

# USAGE MANUAL

1



교육 전

2



교육 중


3




교육 후

# Innerspace Simulator


## 교육 전

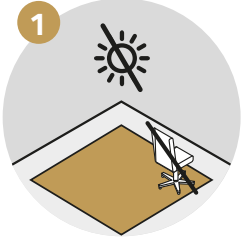

교육 장소에 직사광선 및 반사되는 표면 같은 방해물이 없도록 하십시오.

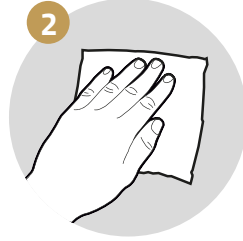


장비를 청소하고 소독하십시오.

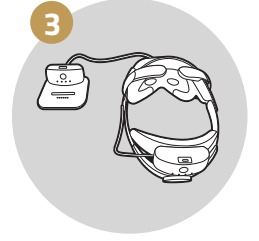


충전 도크에서 완전히 충전된 배터리를 헤드셋 뒤의 슬롯에 끼우십시오.



노트북 컴퓨터에서 ALVR 앱을 시작하면 SteamVR 앱이 자동으로 열립니다.

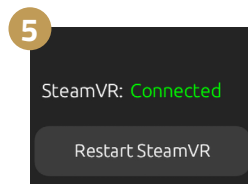

SteamVR이 연결되었음을 알리는 ALVR 대시보드가 이제 왼쪽 아래 구석에 나타납니다.

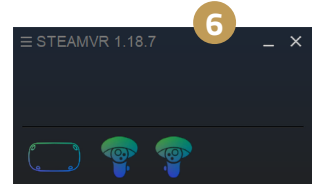

SteamVR에 헤드셋과 컨트롤러 아이콘이 나타나지만, 하드웨어는 많이 사용되지 않으므로 대기 모드로 되어 있을 수 있습니다.



노트북 컴퓨터에서 Innerspace Simulator Hub 앱을 시작하십시오.



### 질문이 있으십니까?

문제 해결 가이드에서 귀하의 문제를 해결하도록 도움을 드립니다.

지원 포털 [support.innerspace.eu](https://support.innerspace.eu) 를 방문하거나 [support@innerspace.eu](mailto:support@innerspace.eu) 로 헬프데스크에 문의하십시오.


# Innerspace Simulator

## 교육 중

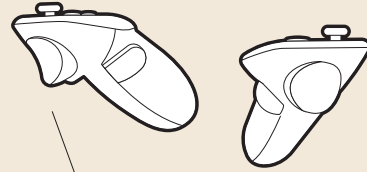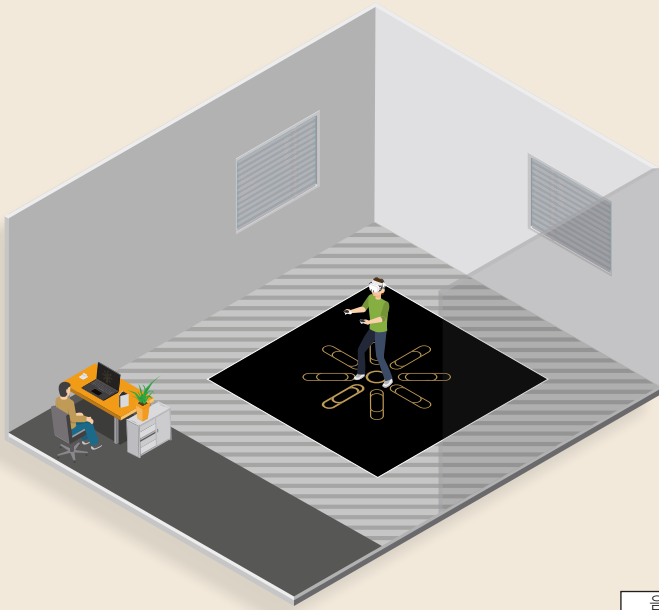

집게 손가락 버튼

시뮬레이터 환경에서 컨트롤러가 교육생의 가상 손에 있습니다.

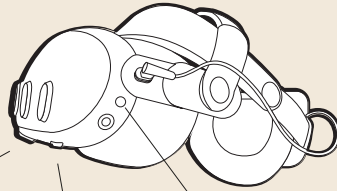

음량 조절

눈 거리 조절

켜기/끄기 버튼

교육 대상자의 헤드셋이 가상현실 (VR)에 대한 포털입니다.




1

교육생을 환영합니다.




2

교육생이 보건 및 안전 지침에 익숙하고 해당 모듈의 학습 목적을 이해하도록 하십시오.

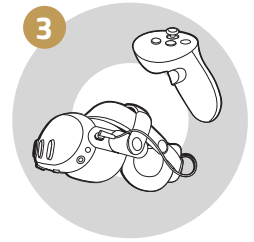


3

교육생에게 시뮬레이터 시스템과 VR 장비를 소개하십시오.

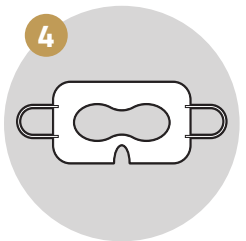

4


교육생에게 새로운 VR 위생 마스크를 착용하도록 요청하고, 눈은 보이고 귀에 고무줄을 고정하여 마스크가 얼굴을 덮도록 하십시오.

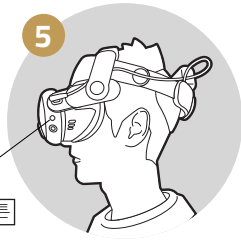

5


켜기/끄기 버튼

교육생이 헤드셋을 착용하도록 도와주십시오. 헤드셋이 꺼져 있으면, 버튼을 2초 동안 눌러 켜십시오. 교육생이 헤드셋을 조정하여 선명한 이미지를 볼 수 있도록 하십시오.

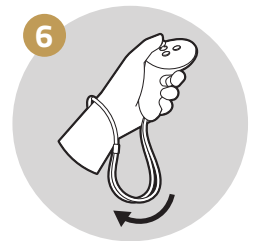


6


교육생에게 컨트롤러를 주십시오. 손목에 스트랩을 감싸고 단단하게 고정해야 합니다.

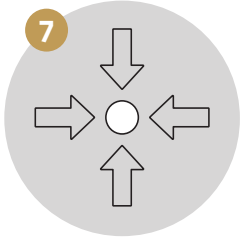

7 교육생이 방의 플레이 공간의 중앙에 위치하도록 하십시오. 최고의 VR 경험을 위해 스트리밍 라우터로 장비 테이블을 마주하게 하십시오.

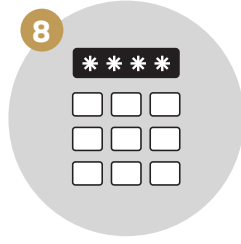

8 컨트롤러 뒤의 집게 손가락 버튼을 이용하여 비밀번호 0000를 입력하도록 지도하고 계속 누르게 하십시오.

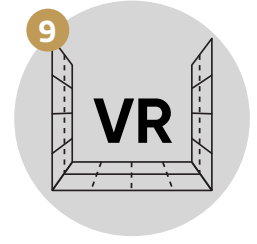

9 몇 초 후에 산악 환경에 있는 것을 알게 됩니다. VR 경계를 시험하기 위해 교육생이 주위를 돌아다니도록 안내하고 보조하십시오.



10 교육 대상자가 모듈을 통하여 플레이하도록 하십시오




11 노트북 컴퓨터에서 교육 모듈을 시작하고 과정 내내 교육 대상자를 감독합니다. 안전 및 성과를 위해 시뮬레이션과 교육 대상자를 모니터링하고 필요할 경우 지원을 제공하십시오.


12 교육 모듈을 완료한 후, 컨트롤러를 교육 대상자의 손목에서 제거한 다음 이를 도킹 스테이션에 다시 놓으십시오. 교육생이 헤드셋을 벗도록 도와주고 다시 현실로 돌아온 것을 환영하십시오.



12 교육 성과에 대해 논의하고 개별적 요구 사항을 해결하십시오.

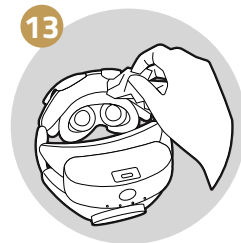

13 교육생의 피부와 직접 접촉한 VR 하드웨어 표면을 소독하십시오.

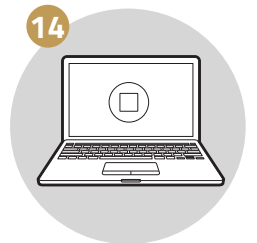


14 교육 모듈을 종료하십시오.

# Innerspace Simulator

## 교육 후



1  
헤드셋 뒤로부터 배터리를 제거한 후 충전 도크에 다시 끼워서 다음 교육 세션 때 충분히 충전될 수 있도록 하십시오.

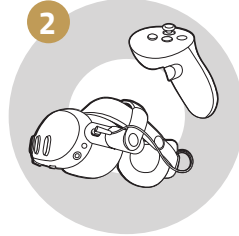

2  
직사광선과 습기가 장치에 손상을 줄 수 있으므로 VR 헤드셋 장비를 적절하게 보관하십시오.



3  
노트북 컴퓨터에서 모든 앱을 종료하고 노트북 컴퓨터는 꺼두십시오.



4  
이러한 모든 단계가 완료되면 작업 공간을 청소하십시오.

## 질문이 있으십니까?

저희 문제 해결 지침이 문제를 해결하도록 도와드릴 것입니다.

저희 지원 포털 [support.innerspace.eu](https://support.innerspace.eu) 를 방문하시거나 [support@innerspace.eu](mailto:support@innerspace.eu) 로 헬프데스크에 연락하여 주십시오



질문이 있으십니까?

저희 문제해결 가이드가  
귀하의 문제를 해결하도록 도움을 드립니다.

---

지원 포털 [support.innerspace.eu](https://support.innerspace.eu) 를 방문하시거나  
[support@innerspace.eu](mailto:support@innerspace.eu) 로 헬프데스크에 연락하여 주십시오.